

# Kangaroo ePump™

## Bomba de alimentación enteral

### Carga y purga de bomba de alimentación

**No use los sets de alimentación por más de 24 horas.**

#### Carga y descarga correctas de un set de alimentación



1) Montaje de válvula de alimentación e irrigación, 2) Montaje de válvula de alimentación solamente, 3) Extremo distal del set de alimentación, 4) Bomba



1) Tome la orejeta en la válvula e insértela con firmeza en la cavidad izquierda. Asegúrese de que la válvula esté bien ajustada. La orejeta debe alinearse con la línea blanca levantada a la izquierda.



2) Tome el sujetador de anillo negro y suavemente pase el tubo alrededor del rotor e inserte el sujetador en la cavidad derecha. **No ajuste en exceso los tubos.**




3) Para descargar correctamente el set de bomba, apáguela y espere 10 segundos antes de sacar el set de alimentación.

#### Purga correcta de la bomba de alimentación



1) Desconecte el set de alimentación del paciente antes de purgar. El set de alimentación debe permanecer cargado durante el procedimiento de purga.

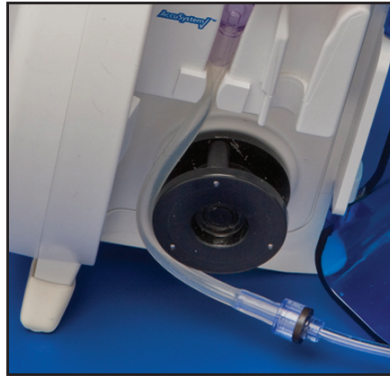

2) **PRECAUCIÓN:** si saca el set de la bomba, ésta podría dañar el set, impedir el uso y afectar negativamente la precisión del sistema.



3) Vacíe el contenido de la bolsa de alimentación.



4) Llene la bolsa de alimentación con agua hasta aproximadamente la mitad de su capacidad total. Selle apropiadamente la bolsa y agítela durante 5 a 10 segundos.



5) Vacíe la bolsa de alimentación y repita el último paso hasta que la bolsa sólo contenga agua limpia.



6) Encienda la bomba. Seleccione "Keep Settings" (Mantener parámetros) para continuar con los ajustes anteriores o "Clear Settings" (Eliminar parámetros) para empezar a programar los nuevos ajustes de la bomba.




7) Oprima el botón "Prime Pump" (Cebear la bomba) para entrar a esta pantalla.



8) Mantenga presionado el botón "Hold to Prime" (Presione para cebear) hasta que fluya agua limpia solamente por el tubo. Una vez que el rotor comienza a funcionar, tarda entre 1 y 2 minutos.



9) Vacíe el agua de la bomba. Cebear para eliminar toda el agua que quede en el set de alimentación.

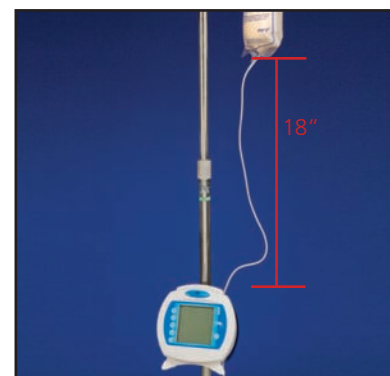

10) **PRECAUCIÓN:** para lograr la precisión adecuada, la parte inferior de la bolsa del set de alimentación debe encontrarse 18" (46 cm) sobre la parte superior de la bomba de alimentación.



**COVIDIEN**

positive results for life™

COVIDIEN, COVIDIEN con logotipo y las marcas con el símbolo™ son marcas comerciales de Covidien AG o su filial.

©2008 Covidien AG o su filial. Reservados todos los derechos.

H62125 5M 0508