

**VENTILADOR PURITAN BENNETT™ 560**  
**INDEPENDENCIA PARA LOS PACIENTES.**  
**TRANQUILIDAD PARA LOS CUIDADORES.**



Nellcor™  
Mallinckrodt™  
Puritan Bennett™  
Airox™  
DAR™  
Shiley™

## LIBERTAD PARA RESPIRAR. LIBERTAD PARA VIVIR.





El ventilador Puritan Bennett™ 560 incorpora funciones de fácil uso y ayuda a mejorar la seguridad de los pacientes, la eficacia médica y la eficiencia sanitaria.

Ligero y compacto, este ventilador portátil ayuda a los pacientes a vivir con mayor independencia, a la vez que ofrece a sus cuidadores la tranquilidad asociada a un sistema de ventilación fiable y de confianza que proporciona su batería de larga duración.

Tanto los pacientes como los cuidadores agradecerán el sistema de alarmas múltiples del ventilador, su funcionamiento silencioso, la prolongada duración de la batería con su indicador en tiempo real, las opciones de alimentación externas y la cómoda bolsa de transporte.

Los prescriptores se beneficiarán de las prestaciones para la gestión de datos del ventilador. Puerto USB para la descarga de tendencias o la transferencia de monitorización y curvas y un software específico para al gestión de estos datos.

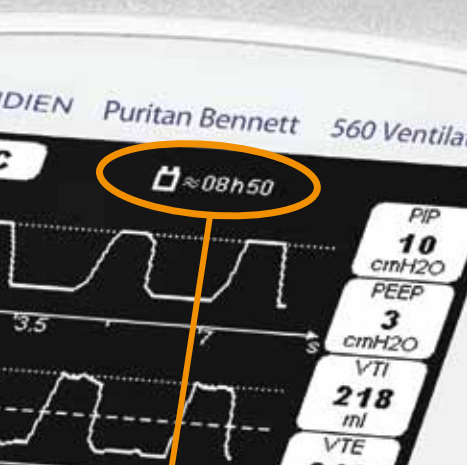

 ≈08h50

El indicador de tiempo real de la autonomía de la batería ofrece tranquilidad al paciente y al cuidador cuando no están en el hogar o se encuentran lejos de una toma de corriente eléctrica.

## **FUNCIONES AVANZADAS: MAYOR COMODIDAD, SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD**

### **Consiga mayor movilidad para los pacientes.**

El ventilador Puritan Bennett™ 560 garantiza la tranquilidad de los pacientes y de los cuidadores cuando no están en el hogar o se encuentran lejos de tomas de corriente eléctrica..

- Indicador de la duración de la batería en tiempo real: vea la cantidad de batería restante, en horas y minutos, en base a los ajustes.
- Batería interna de iones de litio que facilita un prolongado funcionamiento del ventilador.

### **Aumente la seguridad de los pacientes y cuidadores.**

El ventilador trabaja de una manera fiable y segura, que junto a su batería de larga duración, ayuda a mejorar la seguridad de los pacientes y confianza de los cuidadores.

- Función de detección automática de válvula espiratoria: ayuda a seleccionar los ajustes adecuados en base a la configuración del circuito.
- Consumibles de un solo uso: Reduzca el riesgo de contaminación cruzada e infecciones gracias a los bloques de espiración, circuitos y filtros antibacterias desechables.






### Mejore la eficacia médica.

Las funciones avanzadas del ventilador Puritan Bennett™ 560 ayudan al personal sanitario y cuidadores a mejorar la eficacia médica.

- Ajustes de alarmas y parámetros del ventilador vinculados: reducen el riesgo de ajustes clínicamente inadecuados.
- Menús de visualización: acceso a informes de ventilación de 24 horas y pantalla de curvas ventilatorias.
- Gran sensibilidad del trigger inspiratorio ajustable: ayuda a reducir el esfuerzo inspiratorio.
- Modo adulto o pediátrico: permite la selección de configuraciones específicas para pacientes adultos o pediátricos. Seleccione el tipo de circuito para optimizar la compensación de la complianza del tubo.

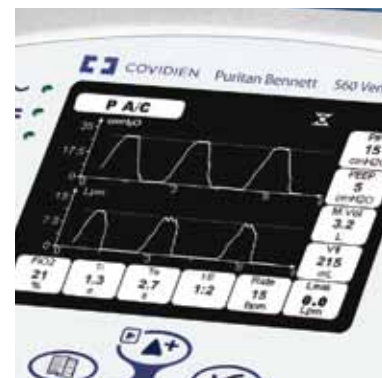


Menús de visualización: acceso a informes de ventilación de 24 horas y pantalla de curvas.

### Aumente la eficiencia sanitaria

Compacto, ligero (4,5 kg) y silencioso (<30 dBA a 1 m), el ventilador Puritan Bennett™ 560 se adapta fácilmente del uso hospitalario al uso doméstico.

- Diseño consistente en todos los modelos: facilita el aprendizaje del personal sanitario y cuidadores.
- Herramientas formativas: muestra a los cuidadores cómo responder con confianza ante las alarmas, cómo navegar por los menús y mantener el ventilador para obtener un rendimiento óptimo.




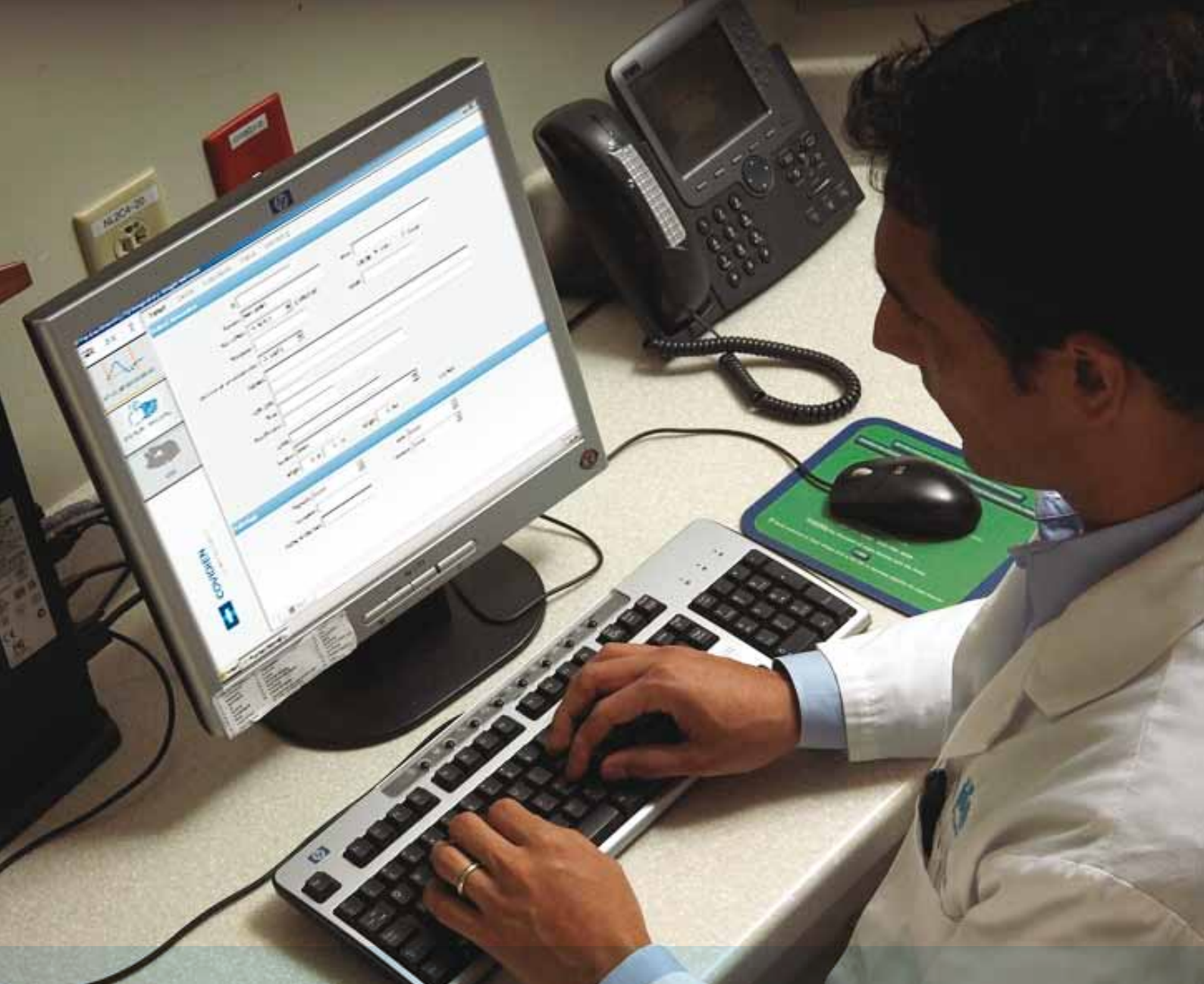

### Acceda a los datos de sus pacientes con facilidad.

El software de gestión de datos Puritan Bennett™ Respiratory Insight permite la visualización y gestión de los datos descargados o transferidos del ventilador.

- Dispositivo de memoria USB: transfiera los datos de los pacientes desde un ventilador de uso doméstico al ordenador del personal sanitario
- Análisis de datos: descargue y archive hasta 12 meses de datos sobre tendencias y hasta 2 días de monitorización y curvas detalladas.

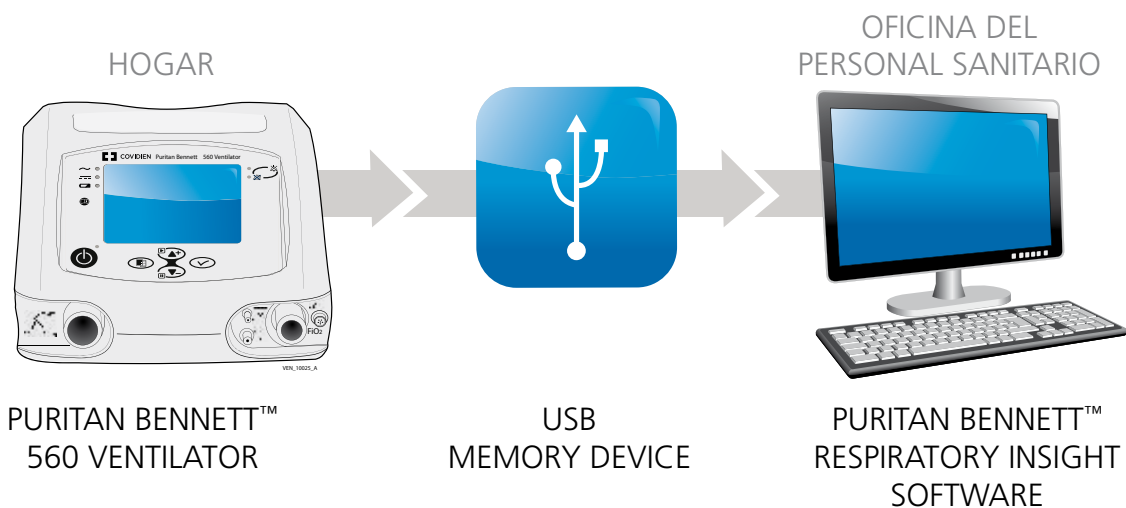

## Ventilador Puritan Bennett™ 560:

### Con más detalle

#### PANTALLAS DE PARÁMETROS DEL VENTILADOR

Entre los parámetros que se muestran en la pantalla, se incluye el volumen tidal de espiración para comprobar que el volumen de retorno coincide con el volumen inspiratorio.

#### VOLUMEN TIDAL OBJETIVO

El volumen tidal objetivo ayuda a optimizar la entrega del volumen tidal y reduce potencialmente la hipoventilación nocturna.

#### TRIGGERS SENSIBLES Y REACTIVOS

El ventilador ayuda a reducir el esfuerzo inspiratorio gracias a múltiples ajustes:

- P5 niveles de trigger inspiratorio con un ajuste específico para uso pediátrico.
- Rampa de aceleración de flujo ajustable (4 niveles)
- Trigger espiratorio ajustable entre 5 y 95%.



#### FUNCIONES DE FÁCIL USO

- Pantalla grande de fácil lectura
- Una única pantalla para los ajustes del ventilador
- Menú de configuración y preferencias para una interfaz de usuario más sencilla
- Informe de ventilación de 24 horas con información sobre los parámetros del paciente
- Detección automática de válvula espiratoria

## Para más información

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial local o visite:

[www.puritanbennett.com](http://www.puritanbennett.com)

Nota: el ventilador Puritan Bennett™ 560 puede colocarse en una silla de ruedas o vehículo motorizado para facilitar la movilidad del paciente. No obstante, no está diseñado para utilizarse como ventilador en transportes de emergencia.